
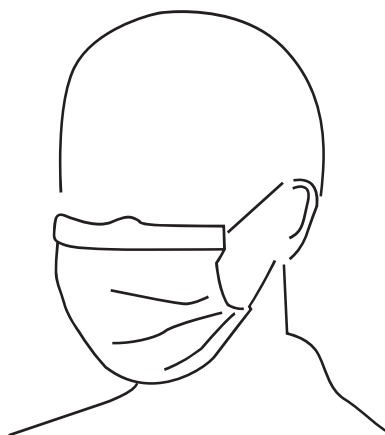


3-lags sterilt kirurgisk **MUNNBIND** 17,5 x 9,5 cm

God luftgjennomgang, beskytter bruker og omgivelser mot bakterier, virus og uren luft.
Materiale: Non-woven polypropylen. Produsent: Weihai Hongyu Nonwoven Fabric Products

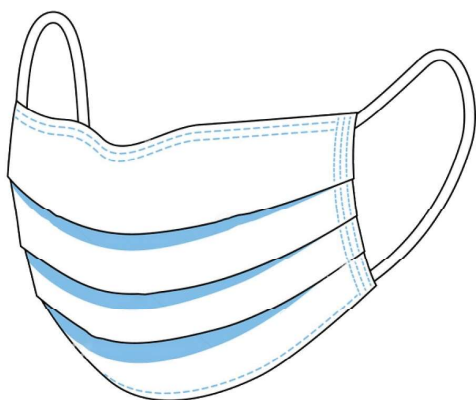

Munnbind brukerveiledning

- 1, Ta ut munnbindet og hold det så foldene som er brettet oppover vender mot munn og nese, og foldene som er brettet nedover vender utover. Nesebåndet øverst i munnbindet skal være i overkant.
2. Hold munnbindet på høyde med munn og nese med nesebåndet i overkant, og press nesebåndet forsiktig mot neseryggen slik at det passer formen på nesen.
3. Fest ørebåndene rundt ørene (evt. bindes bak) og justér dem så de føles behagelige å ha på.
4. Hold nesebåndet på plass, og trekk nedre del av munnbindet ned slik at det dekker både nese og hake, og nedre del av kjeven. Slik oppnås god beskyttelseseffekt.

Bør byttes etter ca. 6 timers bruk. Husk at et brukt munnbind kan være en smittekilde. Legg derfor aldri fra deg et brukt munnbind etter at det har vært i bruk. Vi anbefaler at du legger brukte munnbind i en egen pose, før de kastes.

Produksjonsdato og utløpsdato finnes på forseglingen.

Bør ikke brukes hvis utløpsdato (EXP) er overskredet, eller hvis forpakningen skulle være ødelagt i transport. Oppbevares tørt og kjølig, med god ventilasjon.

Pakken inneholder 25 stk.

TYPE IIR



EN 14683:2019



Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.
www.CE-Marking.EU