

BRUKERVEILEDNING

- 1) Plasser munnbindet på ansiktet med rene hender, blå side vendt ut. Den stive, bøyelige kanten plasseres øverst på neseryggen.
- 2) Plasser en løkke rundt hvert øre.
- 3) Bruk pekefingeren og tommelen for å tilpasse den bøyelige kanten til neseryggen. Trekk maskens nederste kant under haken. Pass på at munnbindet dekker nese og munn.



Slik fjerner du en ansiktsmaske

- 1) Rengjør hendene med såpe og vann eller hånddesinfeksjonsmiddel før du berører masken. Unngå å berøre masken foran. Fronten av masken er forurensset. Berør bare øresløyfe / båndene / båndet. Følg instruksjonene nedenfor for typen maske du bruker.
- 2) Ansiktsmaske med ørestrikk: Hold i begge ørestrikkene og løft og fjern masken forsiktig.
- 3) Kast masken i avfallsbeholder i henhold til avfallsrutiner. Rengjør hendene med såpe og vann eller hånddesinfeksjonsmiddel.



Advarsler:

- Ikke berør utsiden av ansiktsmasken. Hvis du gjør det, vask hendene ordentlig.
- Denne masken er bare til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes.
- Masken skal skiftes ut i tide. Langtidsbruk anbefales ikke.
- Det anbefales å slutte å bruke munnbindet hvis det oppleves ubehag eller bivirkninger.
- Produktet er ikke vaskbart, sørg for at det brukes innen gyldig periode.
- Oppbevares på et tørt, ventilert sted og holdes unna åpen flamme og brennbare materialer.
- Skift maske hvis den er våt, tung å puste i, skitten eller minimum innen 4 timer.